

Przed wykonaniem testu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją używania

TEST CIĄŻOWY HCG PASKOWY
MAMITEST



-TEST PRZEZNACZONY JEST DO SAMOKONTROLI

-CZUŁOŚĆ TESTU WYNOŚI 10 mIU/ml

-DOKŁADNOŚĆ TESTU WYNOŚI 99,96%

PRZEZNACZENIE

Test ciążyowy HCG jest testem immunologicznym przeznaczonym do samokontroli w celu wykrycia hormonu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG) w moczu, umożliwiającego wczesne wykrycie ciąży.

ZAWARTOŚĆ

- Opakowanie foliowe zawiera:
- 1. Jeden test ciążyowy paskowy
 - 2. Jeden środek osuszający
- Pudełko zawiera:
- 1. Dwadzieścia pięć opakowań foliowych z testem ciążyowym paskowym
 - 2. Dwadzieścia pięć pojemników na moc
 - 3. Jedną instrukcję używania

PRZECHOWYWANIE

Test ciążyowy HCG należy przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C (temperatura pokojowa). Unikać światła słonecznego. Test jest stabilny do upłynięcia jego daty ważności podanej na opakowaniu foliowym.

WYKONANIE TESTU

- OKREŚLENIE DATY TESTU**
Test może zostać wykonany w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki.
 - POBRANIE I POSTĘPOWANIE Z PRÓBKĄ**
Test ciążyowy HCG jest przeznaczony do stosowania ze świeżą próbką moczu. Test powinien być użyty zaraz po pobraniu próbki. Do pobrania próbki należy użyć dołączonego pojemnika na moc. Moc nie wymaga żadnej specjalnej obróbki wstępnej.
 - WYKONANIE TESTU**
 - 1) Wyciągnąć pasek testowy z opakowania foliowego
 - 2) Zebrać moc do dołączonego pojemnika na moc
 - 3) Zanurzyć pasek w moczu tak, aby końcówka ze strzałką była skierowana w stronę moczu
- nie zanurzając powyżej linii MAX (maksymalnej).** Pasek można wyjąć po co najmniej 15 sekundach zanurzenia w moczu i położyć płasko na suchej, czystej powierzchni (Patrz rysunek)




- 4) Odczytać wynik w ciągu 5 minut. **NIE INTERPRETOWAĆ WYNIKU PO UPŁYWIE 5 MINUT**
- 5) Po wykonaniu testu, wyrzucić go do kosza

4. INTERPRETACJA WYNIKÓW

Negatywny: Jeżeli w obszarze kontrolnym pojawi się tylko jedna różowa linia, można założyć, że nie jest się w ciąży

pozytywny: Jeżeli w obszarze kontrolnym i testowym pojawią się dwie różowe linie, można założyć, że jest się w ciąży

Nieważny: Jeżeli nie widać wyraźnej różowo-fioletowej linii zarówno w obszarze testowym, jak i kontrolnym lub widoczny jest tylko różowo-fioletowy pasek w obszarze testowym, test jest nieważny. W takim przypadku zaleca się powtórzenie testu.

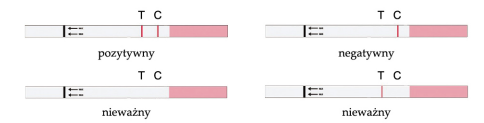

OGRANICZENIA TESTU

- Alkohol może wpływać na wynik testu. Nie zaleca się używania testu po spożyciu alkoholu.
- Czasami próbki zawierające mniej niż 10 mIU/ml moczu również mogą dać wynik pozytywny.
- W bardzo wczesnej ciąży przy której w próbce moczu może być wyjątkowo niskie stężenie HCG test może dać wynik negatywny. W takim przypadku należy pobrać kolejną próbkę co najmniej 48 godzin później.
- Poziom HCG może zostać wykrywalny przez kilka tygodni po naturalnym porodzie, porodzie przez cesarskie cięcie, poronieniu lub aborcji leczniczej.
- W przypadkach, gdy obecne są bardzo wysokie poziomy HCG (>500 000 mIU/ml), może wystąpić fałszywie ujemny wynik z powodu efektu prozone. Jeśli nadal podejrzewa się ciążę,

- należy rozcieńczyć próbkę moczu 1:1 z wodą dejonizowaną i powtórzyć test.
6. Jeśli próbka moczu jest zbyt rozcieńczona (np. niski ciężar właściwy), może nie zawierać reprezentatywnego poziomu HCG. Jeśli nadal podejrzewa się ciążę, należy pobrać pierwszą poranną próbkę moczu w ciągu 24-48 godzin i poddać ją ponownemu badaniu.
 7. Zgodnie z procedurami diagnostycznymi, po wykonaniu testu należy ocenić uzyskane wyniki biorąc pod uwagę inne dane, informacje, badania kliniczne i przed podjęciem decyzji o znaczeniu medycznych skonsultować się z lekarzem w celu postawienia ostatecznej diagnozy.

OSTRZEŻENIA

- WYRÓB PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DIAGNOZY IN VITRO**
1. Przed wykonaniem testu należy uważnie przeczytać instrukcję używania. Należy zwrócić uwagę na położenie linii C i T.
 2. Nie używać po upływie podanej na opakowaniu daty ważności.
 3. Test jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Po użyciu należy go wyrzucić do kosza.
 4. Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
 5. Nie dotykać membrany na pasku.
 6. Po otwarciu opakowania test powinien zostać natychmiast użyty. Długotrwała ekspozycja na wilgoć otoczenia spowoduje pogorszenie jakości produktu.
 7. Z próbkami moczu i użytym testem postępować tak jakby były zakaźne. Unikać kontaktu ze skórą.





Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd.
No. 136, Shiji West Road, 074000,
Gaobeidian City, Hebei Province, P.R. China.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Address:Eiffestrasse, 80, 20537, Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

eLaboo Anna Soltys
ul. Księcia Witolda 49/15
50-202 Wrocław
kontakt@mamitest.pl

Objaśnienia Symboli CE	
	Nie używać ponownie
	Do diagnostyki in vitro
	Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C
	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją
	Chronić przed światłem słonecznym
	Chronić przed wilgocią
	Numer serii
	Data produkcji
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel
	Data ważności
	Importer
	Ilość testów znajdujących się w opakowaniu
	Oznakowanie CE

mami[♥]test

www.mamitest.pl



Instrukcja została poddana tłumaczeniu.
Wyrób medyczny został przepakowany.
Data ostatniej aktualizacji instrukcji:
30.06.2025r.